

Anti-aging mezoterapie

CE
0297

REJUVENACE KŮŽE & ODSTRANĚNÍ VRÁSEK

PRVNÍ KOMPLETNÍ ROZTOK URČENÝ K MEZOTERAPII



LABORATOIRES
FILORGA
PARIS

TF

NCTF 135HA[®]

MESOTHERAPIE ANTI-AGE - rajeunissement cutané global
Injection : Acide hyaluronique haute concentration + Solution polyrevitalisante
AMT-AGING MESTHERAPY - complete skin rejuvenation
Injection: Hyaluronic acid high concentration + Polyrevitalizing solution

CE 0297

30 ANS DE MEDECINE
ESTHETIQUE

1 ML STERILE SYRINGE

STERILISER STERILE OF 1 ML

AIGUILLES DE PRELEVEMENT



WITHDRAWAL NEEDLES

FLACONS MONODOSES



SINGLE USE VIALS

AIGUILLES DE TRAITEMENT



INJECTION NEEDLES

MEZOTERAPIE

Anti-aging

Komplexní terapie

- Komplexní léčba příčin i následků kožního stárnutí (vrásek, ztráty pevnosti, hutnosti, elasticity).
- Ambulantní ošetření, netraumatické a nebolestivé.
- Přírodní, postupné a viditelné výsledky, ale ne excesivní efekt.
- Pacient je trvale v péči dermatologa s pravidelnými terapeutickými konzultacemi.
- Kombinace léčby bez vedlejších účinků s klasickými ošetřeními typu dermální výplně, aplikace botulotoxinu, peelingu nebo ošetření laserem je možná.

Definice

Vícenásobné intradermální injekce velmi malých množství nutritivního (výživného) a revitalizujícího komplexu z 54+1 aktivních ingrediencí podél vrásky v oblasti tváře, krku, dekoltu a hřbetu ruky. Anti-aging mezoterapie může být uskutečněna buď stříkačkou s jehlou nebo perem pro mezoterapii.

Toto ošetření může být aplikováno na veškeré druhy pleti jako prevence a léčba kožního stárnutí.

Trvání ošetření

Sezení trvá přibližně třicet minut v závislosti na rozsahu terapie.

Výsledky

Zlepšení kožního stavu je progresivní a kumulativní.

Výsledek je viditelný již z prvního sezení: kůže je více hydratovaná a posílená – „zdravá“.

V průběhu terapie se pleťový tón stává postupně víc a víc zářící. Kůže je restrukturalizovaná, tužší a pevnější. Tvář je viditelně omládlá.

NCTF® 135 & HA jsou jediné anti-aging produkty, které působí proti příčinám stejně jako proti důsledkům. Výsledky jsou proto ještě více přirozené.

NCTF[®]

jeho úspěch spočívá v jeho složení

KYSELINA HYALURONOVÁ

Hygroskopická vlastnost - fixace velkého množství vody prostřednictvím vytvoření vodíkových a vodních vazeb + podíl na buněčném množení a vývoji krevních a lymfatických tkání – abiogenezi. Kyselina hyaluronová je nepostradatelná složka pro viskoelastickou rovnováhu dermis a epidermis.

14 VITAMÍNŮ

■ Vitamin A: podílí se na pleťové denzitě a poddajnosti regulací keratinizace a hojivých procesů. ■ Vitamin B: ovlivňuje metabolismus esenciálních mastných kyselin ■ Vitamin C: vliv na syntézu kolagenu, inhibiči volných radikálů a lokální hyperprodukcii melaninu. ■ Vitamin E: anti-radikálové působení vodíkovou inhibiči kysličníku H₂O₂ (antioxidační).

24 AMINOKYSELIN

Účast na bílkovinné syntéze fibroblastů.

■ KOLAGEN je většinou tvořen z prolínu + hydroxyprolinu + lysinu.
■ ELASTIN je složený z kyseliny asparagové + threoninu + serinu.

4 MINERÁLY

Účast na stovkách enzymatických reakcí a základních celulárních funkcích, jako kofaktory minerály zlepšují různé biologické metabolismy. Například hořčík je spojený se 180 enzymatickými reakcemi.

6 KOENZYMŮ

Katalýza řady metabolických reakcí prostřednictvím snížení nezbytné energie. Tyto biochemičtí aktivátoři tak zvyšují stavební rychlost tkání.

5 NUKLEOVÝCH KYSELIN

Nukleové kyseliny jsou sloučeniny tvořené z nukleotidů. Základní molekuly DNA a RNA nesou informaci k tvorbě a regulaci proteinů.

2 REDUKČNÍ ČINIDLA

Substance, které snadno ztratí jeden nebo víc elektronů. Proto zastaví radikální oxidační reakce kožní vrstvy dermis a epidermis.

TECHNIKY

ANTI-AGING MEZOTERAPIE VYUŽÍVÁ SPECIFICKÉ TECHNIKY V ZÁVISLOSTI NA OŠETŘOVANÉ OBLASTI. KAŽDÉ OŠETŘENÍ MEZOTERAPIÍ MŮŽE BÝT DOPLNĚNO S X-HA³ APLIKACÍ.

Sériová aplikace

30G JEHLA + STRÍKAČKA



- Podél vrásek a mikrolinek
- Intradermální mikro-injekce (0,01ml)
- Povrchní, v pravidelných intervalech
- Malé papulky, několik málo milimetrů oddělené

Nappage

30G JEHLA + STRÍKAČKA

NEBO PERO NA MEZOTERAPII



- Přes celou tvář, krk, jugulum, dekolt a hřbet ruky
- Velmi povrchní kožní mikro-injekce
- Malé papulky, sotva viditelné, zhruba 1 centimetr vzdálené

IN VITRO STUDIE

Prováděné Francouzským nezávislým výzkumným střediskem se specializací na celulární a molekulární farmakologii.

Stimulace buněčného růstu

+ 147%
buněk (lidských fibroblastů) za 72h

CÍL

Zhodnotit efekt NCTF® [komplexu] na proliferaci mladých a stárnoucích fibroblastů.

METODA

Screeningová metoda (začleněním 3H-thymidinu – radioaktivních ukazatelů do DNA makromolekul). 96 vzorků s celkem 2000 mladými fibroblasty za 72h kontaktu.

VÝSLEDEK

NCTF® stimuluje signifikantně začlenění thymidinu (147% kontrolní/zkoumaný vzorek $p < 0.01$).

NCTF® stimuluje množení mladých a stárnoucích lidských fibroblastů, stejně jako stimulace buněčné obnovy.

Aktivní zpevnění kožní vrstvy

+ 256%
extracelulárního kolagenu za 72h

CÍL

Zhodnotit efekt NCTF® [komplexu] na syntézu hlavních složek extracelulární matrix.

METODA

Screeningová metoda (začleněním 3H- prolinu – radioaktivních ukazatelů – do proteinů matrix). 96 vzorků s 8 500 fibroblasty za 72h kontaktu.

VÝSLEDEK

NCTF® stimuluje významně začlenění prolinu do proteinů extracelulární matrix (256% kontrolní/zkoumaný vzorek $p < 0.01$).

NCTF® stimuluje syntézu proteinů bohatých na prolin [kolagen I většinou].

Celulární ochrana

+ 90%
anti-radikálová ochrana

CÍL

Zhodnotit efekt komplexu na úroveň peroxidu vodíku a lipidové peroxidace v lidských buňkách (Jurkat), které byly či nebyly exponovány záření UV A+B záření.

METODA

Průtoková cytometrová metoda. 96 vzorků. 10 000 Jurkat buněk. 24h po záření dávkou 240 J/cm² měřena lipidová peroxidace.

VÝSLEDEK

NCTF® vykazuje významnou anti-radikálovou antioxidační aktivitu. NCTF® přispívá k buněčné ochraně redukcí produkce peroxidu vodíku, stejně jako snížením peroxidace lipidů následkem UVA+B záření.

Viskoelastická regenerace

+ 366%
inhibitoru exprese genu elastázy

CÍL

Zhodnotit současně efekt NCTF® na víc než sto genů spojených s růstem, diferenciací, derivováním, metabolismem, komunikací a celulární smrtí.

METODA

DNA array technologie
96 vzorků
12750 fibroblastů (NHDF) za 24h a 96h inkubace
Různá expresní analýza

VÝSLEDEK

Studie ukazuje, že statisticky má NCTF® významný účinek na nitro-buněčnou koncentraci RNA elastasy-specifického inhibitoru (ESI). Stimulující exprese tohoto inhibitoru pomocí NCTF® pomáhá tkáni se zpevněním.


ANTI-AGING ÚČINEK

MULTICENTRICKÁ KLINICKÁ STUDIE

Provedená u 17 francouzských dermatologů
na 40 pacientech ve věku 29 – 80 let.


Vrásky a mikrolinky: o 72%

v 67% případů

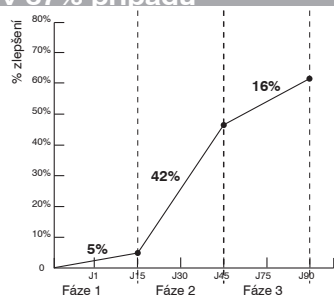


Svěžest: o 144%

v 88% případů

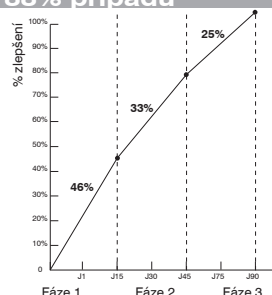


Kožní tonus: o 103%

v 73% případů

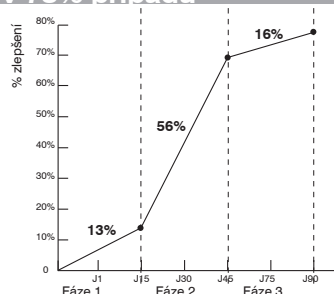

Hydratace: o 132%

v 83% případů

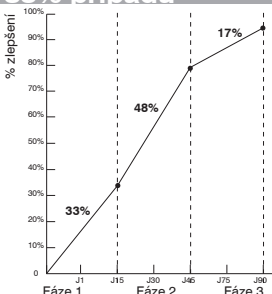

SADA 5 SEZENÍ PRO MAXIMÁLNÍ A DLOUHODOBOU EFEKTIVITU:

3 JASNĚ DEFINOVANÉ FÁZE:

1. Zahájení procesu: 1. a 2. ošetření
2. Korekční fáze: 3. a 4. ošetření
3. Udržovací / konsolidační fáze: 5. ošetření

Tolerance

Bezpečné ošetření
bez vedlejších účinků

1. ERYTÉM:

- > nepřítomnost erytému: ve 47% případů
- > nepatrné erytémy: ve 41% případů
- > mírné erytémy: v 8% případů

2. EDÉMY:

- > nepřítomnost edémů: 77% případů
- > nepatrné edémy: 16% případů
- > mírné edémy: 5% případů

3. TEČKOVITÉ KRVÁCENÍ NA SLIZNICI:

- > nepřítomnost z tečkovité krvácení na sliznici: 79% případů
- > nepatrné tečkovité krvácení na sliznici: 16% případů
- > mírné tečkovité krvácení na sliznici: 5% případů

Index spokojenosti

Pro vysoký index spokojenosti
lékařů a jejich pacientů

Na konci sady 5 injekcí v 90 dnech

1 – SPOKOJENOST LÉKAŘŮ

> 100% jsou spokojení či velmi spokojeni

2 – SPOKOJENOST PACIENTŮ

> 97% jsou spokojení či velmi spokojeni

2 PRODUKTY

Prizpůsobené potřebám všech typů pleti

NCTF[®] 135

0,025 MG/ML VOLNÉ KYSELINY HYALURONOVÉ



Indikace


LÉČBA PRVNÍCH VRÁSEK A PREVENCE STÁRNUTÍ KŮŽE

- Hydratace
- Svěžest
- Vrásky

6 měsíční protokol:

PRVNÍ VRÁSKY A PREVENCE STÁRNUTÍ

6 měsíční léčba

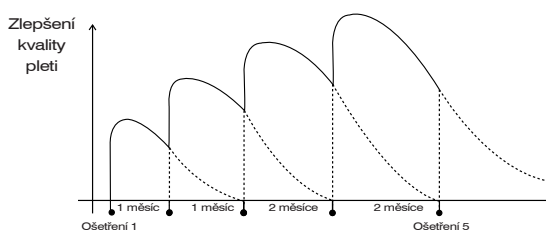

UDRŽOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

1 OŠETŘENÍ KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ

NCTF[®] 135HA

5 MG/ML VOLNÉ KYSELINY HYALURONOVÉ



Indikace


LÉČBA ZNÁMEK STÁRNUTÍ
A UDRŽENÍ KOŽNÍCH VLASTNOSTÍ

- Intenzivní hydratace
- Začervenání
- Zvýšení denzity zralé kůže
- Vrásky
- Pevnost

3 měsíční protokol:

INTENZIVNÍ PÉČE O ZNÁMKY STÁRNUTÍ

6 měsíční léčba

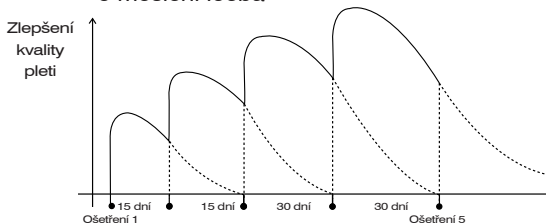

Udržování výsledků

1 OŠETŘENÍ KAŽDÉ 3 MĚSÍCE

FILORGA

Komplexní anti-aging řešení

Anti-aging specialista v oblasti injekční terapie v posledních 30 letech

- 30 let praxe v praktické aplikaci
- Certifikát ISO 13485 potvrzuje dokonalý dohled nad výrobou a tím vysokou bezpečnost výrobků.
- CE značka produktů s označením CE0297
- Požadavky na kvalitu vyhovují Evropským lékařským standardům.
- Aktivní výzkum v oblasti výzkumu a vývoje (R&D) poskytuje inovativní a bezpečná řešení lékařům i jejich pacientům.

Partnerství poskytované lékařům

- Lékařské vyškolení v nejnovějších omlazovacích technikách pod vedením mezinárodních expertů
- Kompletní vybavení pro aplikaci včetně terapeutických setů
- Klinické studie prokazující účinnost výrobků
- Efektivní, zodpovědný zákaznický servis

Komplexní zvládnutí projevů stárnutí



■ DERMÁLNÍ VÝPLNĚ: XHA³

První cross-linked implantát kyseliny hyaluronové určený pro střední vrásky, hluboké vrásky a rty.

Optimální koncentrace (23mg/ml X-HA³) a vysoká molekulární hmotnost (12,5 mDalton)



■ POVRCHOVÝ PEELING: Glykopeel® 50%, 70% a 70% MAX

Celkový omlazovací peeling bez potřeby vzdát se dočasně společenského života s těmito indikacemi: vrásky, kožní defekty, pigmentové skvrny, lesklá mastná pleť,...

18 ingrediencí včetně kyseliny glykolové s okamžitým a dlouhodobým působením



■ FILORGA PROFESSIONAL

První dermokosmetika vyvinutá na základě výzkumů a požadavků estetické dermatologie.

Tím, že lékař kombinuje tato různá řešení, uplatňuje celkový přístup k potřebám pacienta. Nevolí tedy částečné řešení, které by se soustředilo jen na některé známky stárnutí.

NCTF®

PRVNÍ KOMPLETNÍ ANTI-AGING ROZTOK

PRO PŘIROZENÉ, POSTUPNÉ A VIDITELNÉ VÝSLEDKY

Exkluzivní složení

ÚČINNÝ A BEZ RIZIKA

- NON-CROSS-LINK KYSELINA HYALURONOVÁ
- Koktejl z 55 výživných ingrediencí pro dermis

UNIKÁTNÍ KNOW-HOW

- **Úspěšné složení:**
výsledek 30 roků výzkumu, vývoje a odborných znalostí
- **Kyselina hyaluronová extrémně čištěná:**
žádné předběžné zkoušky nejsou potřebné
- **Sterilizace mikrofiltrací:**
udržuje biologickou integritu přísad
- **CE značený produkt:**
očekávaná úroveň bezpečnosti praktikem a pacientem
- Výrobní jednotka je ISO certifikovaná **13485:2003**
- **Nízkoviskózní řešení** pro perfektní integraci s tkáněmi: povrchové ošetření jakékoliv vrstvy.

Indikace

KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ DERMÁLNÍMI MIKROVÝPLNĚMI PŘÍČIN I NÁSLEDKŮ STÁRNUTÍ KŮŽE

- vrásky a mikrolinky
- elasticita
- pevnost
- hluboká hydratace
- svěžest

PRO VŠECHNY TYPY KŮŽE

Tvář, krk, dekolt a hřbet ruky

Balení

SOUPRAVA PRO 5 KOMPLETNÍCH OŠETŘENÍ MEZOTERAPIÍ

- 3ml ampulky pro okamžité použití
- 18G odběrová jehla
- 30G a 32G aplikační jehla
- 3ml stříkačky

FF

NCTF 135HA[®]

30 ANS DE MEDECINE
ESTHETIQUE

LABORATOIRES

FILORGA

PARIS

MESOTHERAPIE ANTI-AGE - rajeunissement cutané global
Injection : Acide hyaluronique haute concentration + Solution polyrevitalisante
KIT COMPLET POUR 5 TRAITEMENTS DE COMPLEMENT : FLACONS MONODOSES DE 3 ML + SERINGUES DE 1 ML + AIGUILLES DE PRELEVEMENT 16G + AIGUILLES DE TRAITEMENT 30G

ANTI-AGING MESOTHERAPY - complete skin rejuvenation
Injection: Hyaluronic acid high concentration + Polyrevitalizing solution
ALL-IN-ONE KIT FOR 5 FILLING TREATMENTS: SINGLE USE 3 ML VIALS + 1ML SYRINGE + 16G NEEDLES WITHDRAWAL + 30G INJECTION NEEDLES

CE
0297

30 LET ESTETICKÉ MEDICÍNY

Od konce 70. let shromáždily laboratoře Filorga - Laboratoires Filorga - tým specialistů, který odstartoval moderní výzkumný program zabývající se stárnutím kůže. Cílem těchto výzkumů bylo pochopení procesů stárnutí a lepší boj proti nim.

Jak? Prostřednictvím komplexní terapie, která kombinuje omlazovací lékařské techniky a nechává je působit ve vzájemné součinnosti. Tím efektivně bojuje proti vráskám, ale také proti nedostatečné pevnosti či zářivosti pleti. **Specialisté Laboratoires Filorga, skuteční průkopníci v tomto oboru, využili výsledky svého výzkumu a na jejich základě v 90. letech vyvinuli biologické produkty, které jsou schopné zbrzdit či zastavit příznaky stárnutí:** jedná se o anti-aging mezoterapii se známým polyrevitalizačním komplexem NCTF®, glykolový peeling GlyKopeel® a dermální výplně kyseliny hyaluronové X-HA3®. Poté, co byly produkty Laboratoires Filorga přijaty dermatology, lékaři estetické medicíny a plastickými chirurgy ve více než 50 zemích do rutinního užívání, staly se uznávaným expertem na stárnutí kůže. **Na základě řady inovací se obchodní značka FILORGA stala vedoucí firmou na trhu s anti-aging medicínou a dermatokosmetikou.**

V České a Slovenské republice se exkluzivním dodavatelem výrobků Laboratoires Filorga stala společnost medical beauty s.r.o. Úkolem této společnosti je umožnit užívání širokého portfolia produktů určených jak pro domácí použití, tak pro profesionální salóny a estetické kliniky. Estetická ošetření moderní dermatologie zahrnují aplikaci botulotoxinu, výplní, peelingu či mezoterapie. **Proto Vám nabízíme nejen prodej, ale i trénink pro zdravotnické profesionály v prostorách Kliniky estetiky a medicíny proti stárnutí medical beauty nebo přímo na Vašem pracovišti.**

medical beauty
health, beauty and anti-aging solutions



V ČR a SR dodává:
medical beauty s.r.o.
nám. generála Píky 27, CZ - 326 00 Plzeň
prodej@medicalbeauty.cz
tel.: +420 377 244 377
mobil: +420 777 334 007

LABORATOIRES
FILORGA
PARIS

www.filorga.cz - www.filorga.sk